


MANUEL D'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT
DS2208

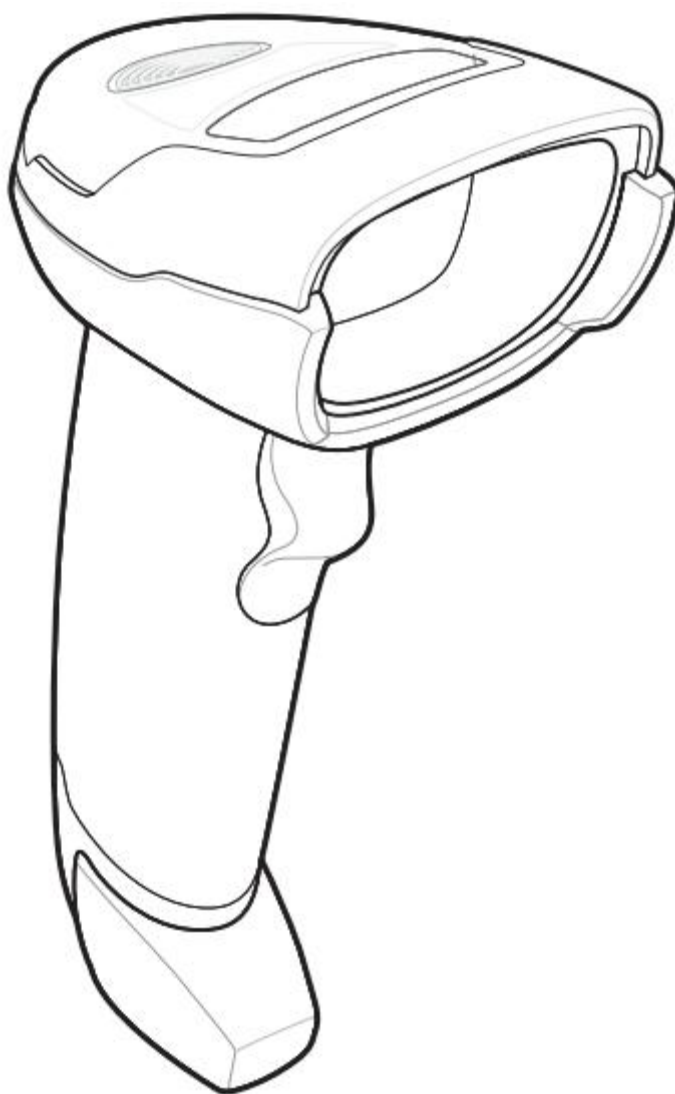

DS2208



Procédure de configuration du lecteur DS2208

1. L'application ChronoMEDIC Production doit être fermée.
2. Brancher le fil gris au lecteur, puis dans le port USB de l'ordinateur.
3. Attendre que l'ordinateur le détecte (environ 10 secondes).
4. Scanner le code Datamatrix suivant, une série de différents signaux sonores se fera entendre.




5. Ouvrir ChronoMEDIC Production, normalement un message pour l'ajout de l'appareil devrait s'afficher, sinon :
 - a. Aller dans l'onglet Utilitaires.
 - b. Bouton CONFIGURATION, puis bouton USB.
 - c. Cliquer sur le nouvel appareil et scanner votre carte d'employé, il devrait s'afficher dans le carré en bas.
 - d. Aller dans l'onglet Consultation.
 - e. Bouton HISTORIQUE (plateau ou produit).
 - f. Scanner votre carte d'employé.
 - i. Vérifier qu'un message d'erreur s'affiche (ex. : Produit xxx n'existe pas).

NOTE IMPORTANTE


Si votre lecteur est plus vieux, il est possible que cette procédure ne fonctionne pas du premier coup. Vous devez mettre le micrologiciel (firmware) du lecteur à jour.



1. Allez sur le site internet de Zebra pour télécharger l'application Zebra_123_Scan
 - a. <https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/software/scanner-software/123scan-utility.html?downloadId=e37c6f0c-fdb2-4c25-a8de-6a5b2cc77315>
2. Connecter le lecteur/base via USB au PC (les lecteurs sans fil doivent être dans le socle).

- Ouvrez le logiciel 123Scan et cliquez sur UPDATE SCANNER FIRMWARE du lecteur.

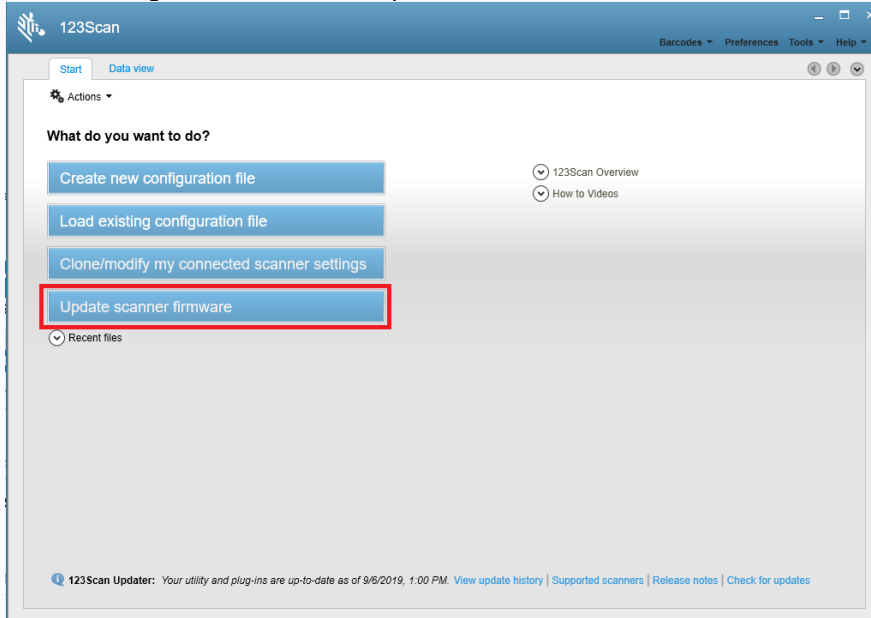

- Suivez les instructions dans les captures d'écran (À TITRE D'EXEMPLE, LE MODÈLE DE LECTEUR SERA DIFFÉRENT) :

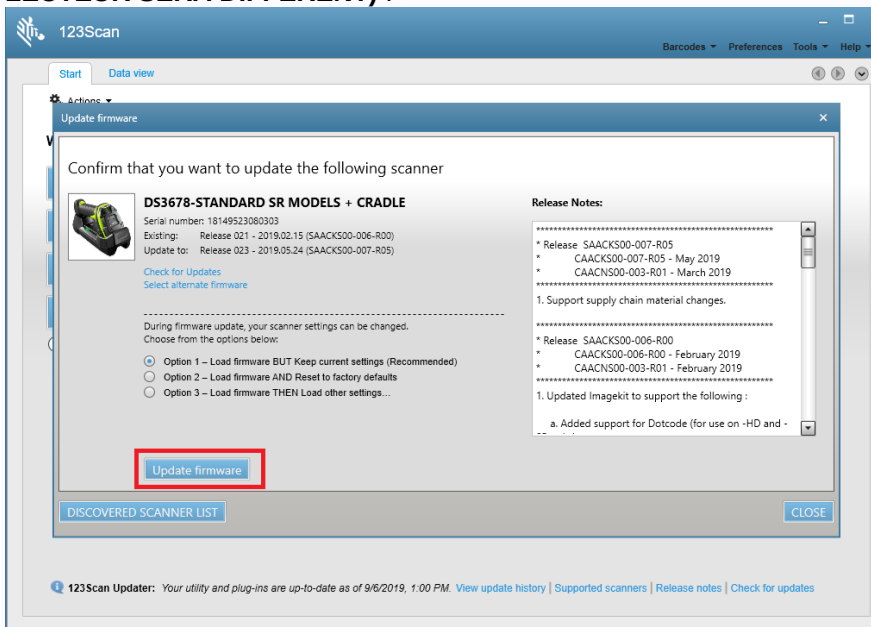

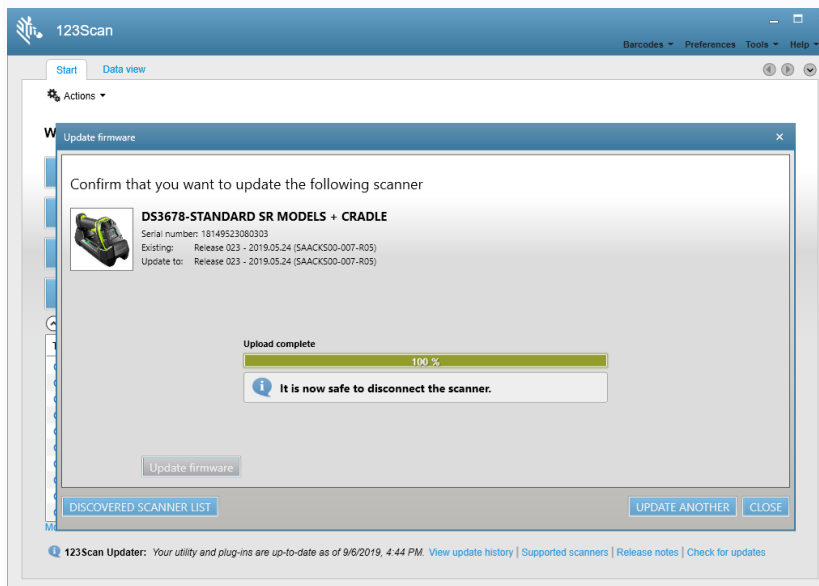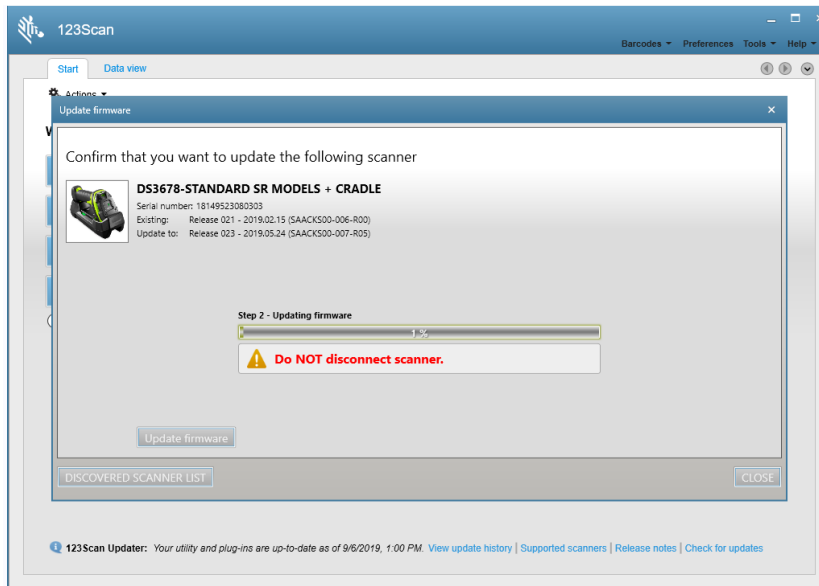

5. Refaire la configuration du lecteur expliquée au début de ce document et refaire les tests.