



CONFIGURATION DU LECTEUR SYMBOL LS3578

Pour utilisation via un port USB pour les applications médicales de NBA

IMPORTANT : NE PAS BRANCHER LE BLOC D'ALIMENTATION SUR LA BASE DE RECHARGE ET COMMUNICATION POUR LA PREMIÈRE CONFIGURATION. BRANCHER LE CÂBLE USB À L'ORDINATEUR ET DÉMARRER ChronoMEDIC PRODUCTION

Scannez les codes à barres suivants :



SET DEFAULTS

Scannez le code « PAIR » qui se trouve sur la base de recharge et communication et attendre la confirmation du lecteur



IBM HAND-HELD USB

(Type d'interface USB)



SCAN OPTIONS

(Ajout d'un CR et LF à la suite du code)



<DATA><SUFFIX>



ENTER

VEUILLEZ REBRANCHER LE BLOC D'ALIMENTATION SUR LA BASE.